



UN REGARD D'AVANCE SUR L'OPHTALMOLOGIE



MISE A JOUR D'UN
POSTE EN VERSION 6.9a


Pour toutes demandes de support ou d'aide concernant cette procédure, n'hésitez pas à contacter SanoTek au 09.54.18.03.05 option 3 ou par mail à : support@sanotek.com

I - Mise à jour d'un poste de visualisation.

I.1 - Dans le répertoire d'installation, extraire tous les dossiers du fichier « CD_INT_Heyex »


I.2 - Aller dans « CD_Int »

I.3 - Faites un clic droit sur « Setup.exe » et lancer en tant qu'administrateur

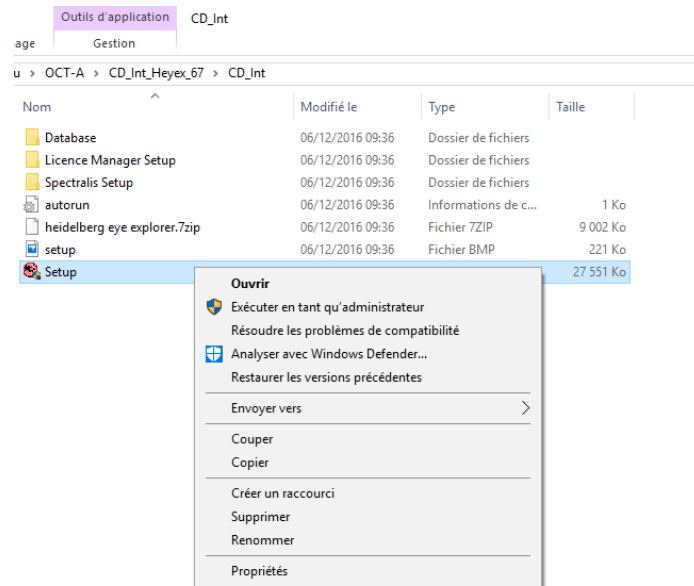


I.4 - Choisissez la langue dans laquelle vous voulez mettre à jour le logiciel : en anglais, puis cliquez sur « OK ».

I.5 - Cliquer sur « Next » jusqu'à arriver à la fenêtre suivante :

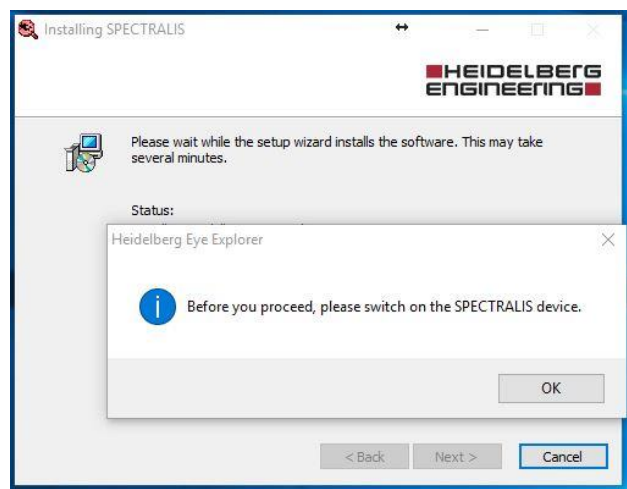

I.6 - Cliquer sur « OK »

I.7 - Cliquer sur « Exécuter » :

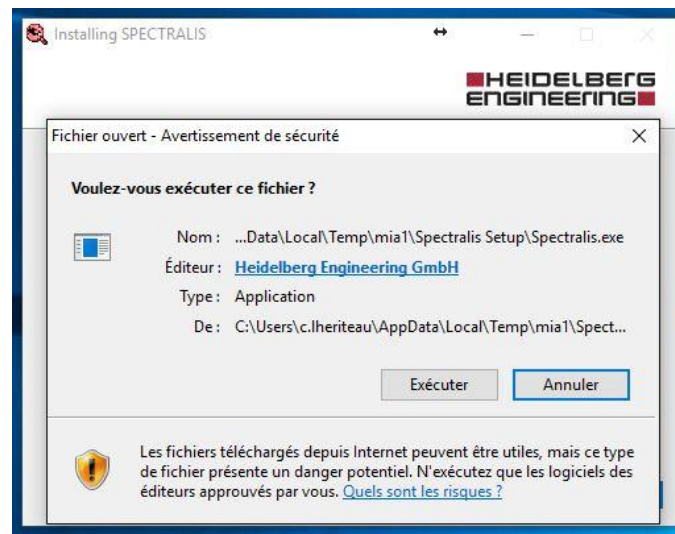

I.8 - A la fenêtre, suivante, veuillez cliquer sur « Exécuter ».

I.9 - Décocher « Restart now » puis cliquer sur « Finish ».

